


《QDH-602 の簡単セット方法》


はじめに、クイックエイド及びご利用の乾燥ケースから不要になりました乾燥剤等すべてを取り出して下さい。

① 袋から消耗品セットを取り出す

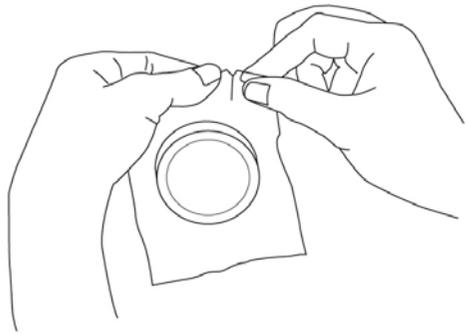


V カット部を引き裂くと簡単に取り出せます。

注意 このフィルムは剥がさない。

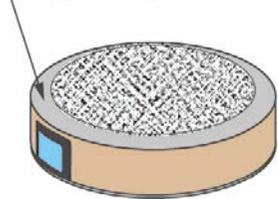

② ケースにそのまま入れる

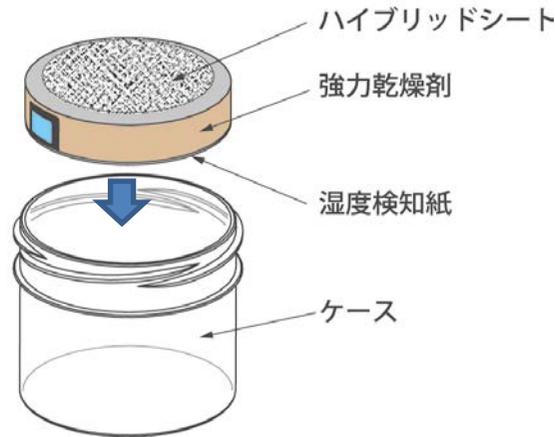


裏面にある使用開始日を記入しておく、交換時期の目安がわかります。

湿度検知紙
四角の中がピンク色
になったら乾燥剤の
交換目安です。

使用開始日
月 日

③ 補聴器を入れキャップを閉める


完了

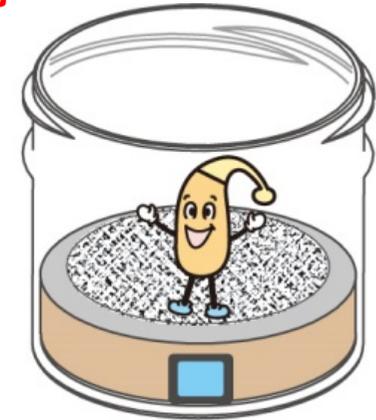

設置イメージ

補聴器をハイブリッドシート（黒色不織布）の上に直接置き、湿度検地部が見えるようにセットします。

スポンジは使いません。

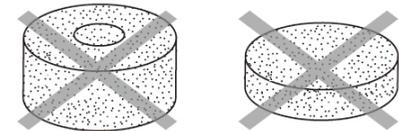

その他、詳細は商品取扱説明書をご確認ください。

IDEX